




Tesztkazetta



Steril tampon

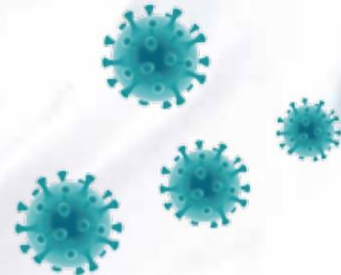

SARS-CoV-2 Antigén

SAKEMBER ÁLTALI FELHASZNÁLÁSRA

SARS-CoV-2 Ag Gyorsteszt

A VivaDiag™ SARS-CoV-2 Ag gyorsteszt a SARS-CoV-2-ből származó nukleokapszid fehérje-antigén gyors, kvalitatív kimutatására alkalmas orr-, oropharyngealis vagy nasopharyngealis tamponmintából. A teszt csak in vitro diagnosztikai felhasználásra szolgál.

Specifikáció


Működési elv	Kolloid arany
Minta típus	Légúti minta (orr-, oropharyngealis vagy nasopharyngealis tamponminta)
Minta térfogat	60 µL
Tesztelési idő	15 perc
Tesztelési hőmérséklet	15-30°C
Tárolási hőmérséklet	2-30°C
Lejárat (bontatlan doboz)	24 hónap




A teszt lépései

----Mintavétel


Orr tamponminta

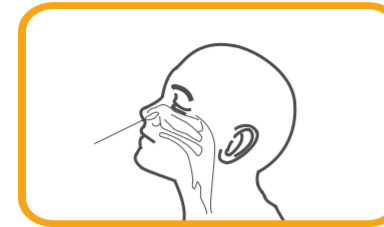


Oropharyngealis tamponminta

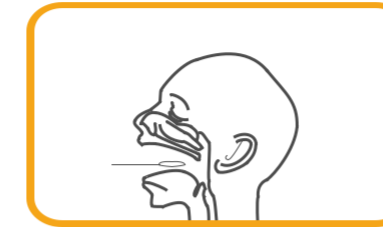


Nasopharyngealis tamponminta

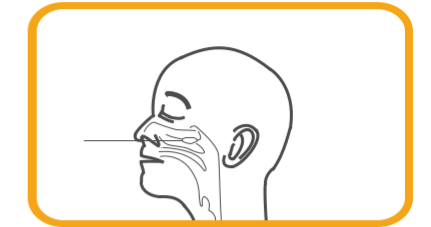

----Minta előkészítés és bemérés

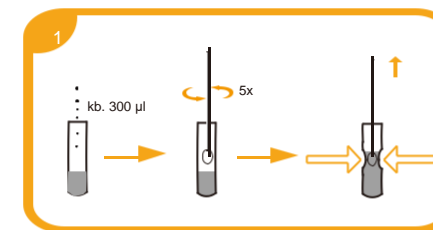


1. Minta beoldása

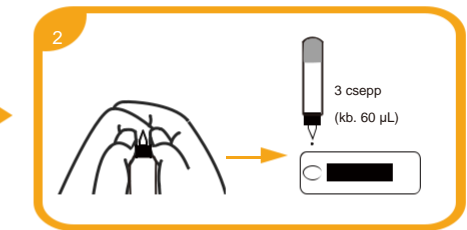

2. Minta bemérése

----Detekció

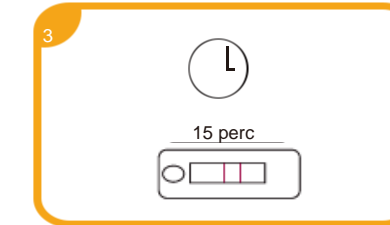

3. Eredmény leolvasása

----Eredmény kiértékelése



Pozitív



Negatív



Érvénytelen

Megjegyzés: Ez a gyorsteszt nem önteszt, szakember általi felhasználás ajánlott. A teszt eredménye önmagában nem használható fel az új típusú koronavírus diagnosztizálására vagy kizárására, a rendelkezésére álló többi klinikai információval együtt kell kiértékelni.